

## SEGNALAZIONE IN MERITO AI PRODOTTI LIFESCAN ONE TOUCH VERIO PRO E VERIO IQ

Responsabile Editoriale  
Vincenzo Toscano

Lifescan in data 22 marzo ha comunicato che **ritirerà il sistema di monitoraggio della glicemia One Touch Verio Pro e One Touch Verio IQ per risultati non corretti che si verificano per livelli estremamente elevati di glucosio nel sangue:**

- il Verio Pro per valori di glicemia > 1024 mg/dL, anziché mostrare il previsto avviso “Glicemia troppo alta” (che mostra già a partire da valori di glicemia > 600 mg/dL), riporta sullo schermo e memorizza un risultato non corretto più basso di 1024 mg/dL;
- il Verio IQ per valori di glicemia > 1024 mg/dL, anziché mostrare il previsto avviso “Glicemia troppo alta” (che mostra già a partire da valori di glicemia > 600 mg/dL), si spegne.

**Per tali motivi Lifescan chiede di interrompere la distribuzione di entrambi gli strumenti e di conservare gli strumenti, che verranno ritirati da un incaricato che passerà per la sostituzione.**

Lifescan sta provvedendo ad informare direttamente i pazienti tramite il Servizio Clienti (telefono 800-029377, dal lunedì al venerdì h 9-19) e il sito web, ma conta anche sulla collaborazione dei professionisti impegnati in ambito diabetologico (medici e infermieri) per provvedere alla sostituzione dell'apparecchio direttamente o tramite i reparti.

**Tutti gli altri strumenti Lifescan non sono interessati da tali problemi.**

Per trovare le informazioni complete: <http://www.lifescan.it/recall>